



Nikoline Omnipod – Blodsukkermåling Omnipod




1. Isæt test strimmel eller tænd på PDM/fjernbetjening og isæt test strimmel

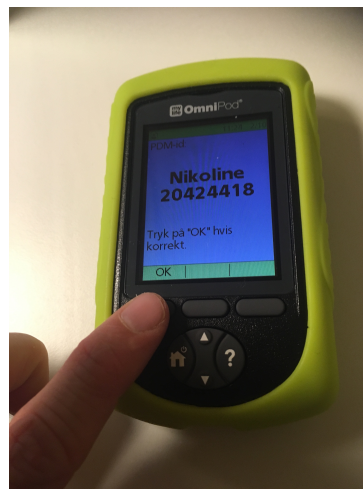


2. Startside. Tryk OK. Herefter skrives kode på skærmen samt funktionen lys på skærmen. Vent indtil billede af bloddråbe.

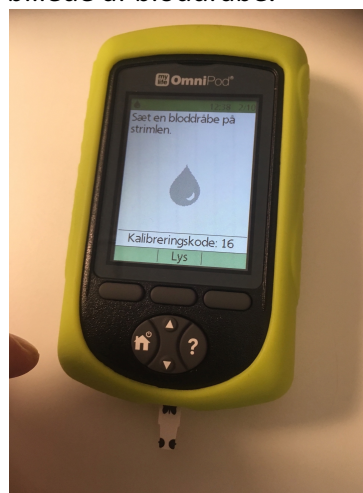


3. Tilsæt bloddråbe til teststrimmel

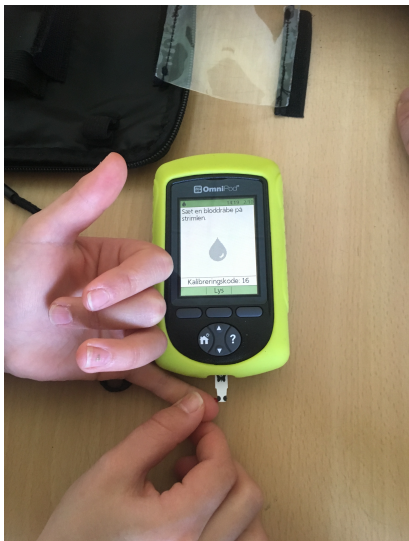


4. BS måling, bloddråbe ind fra siden

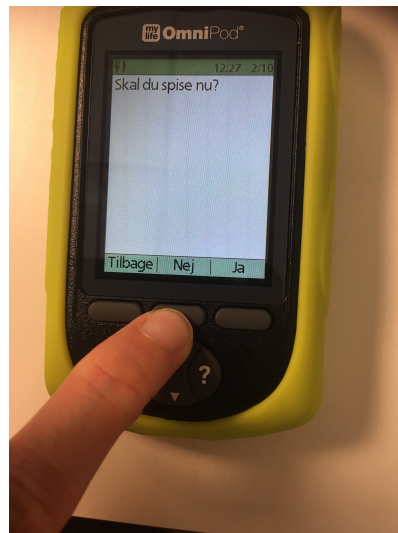


8. Vælg Nej eller Ja

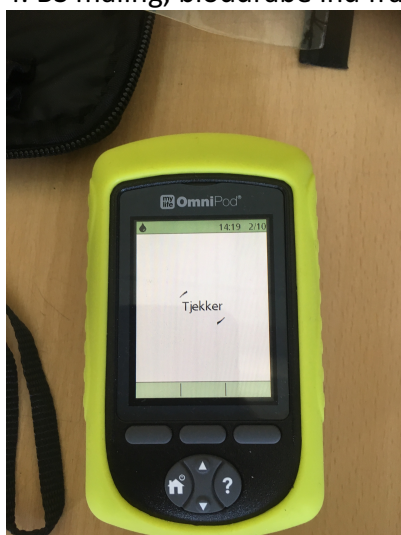


5. PDM måler

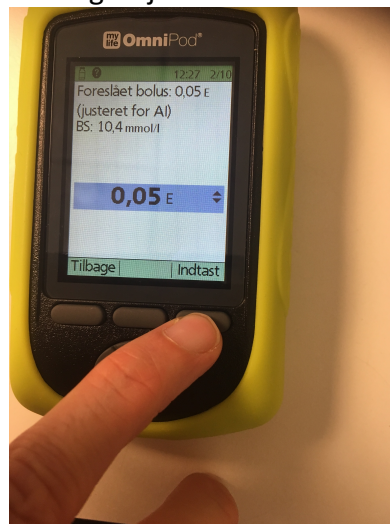

9. Skærm med billede af planlagt bolus – vælg indtast. Brug piletasterne til at give en lavere dosis insulin.

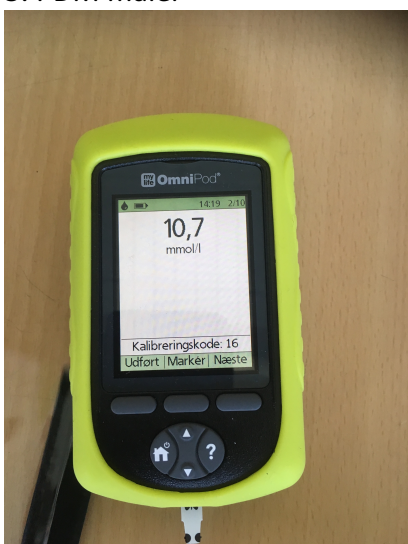

6. Blodsukkerværdi angives – tryk på Næste

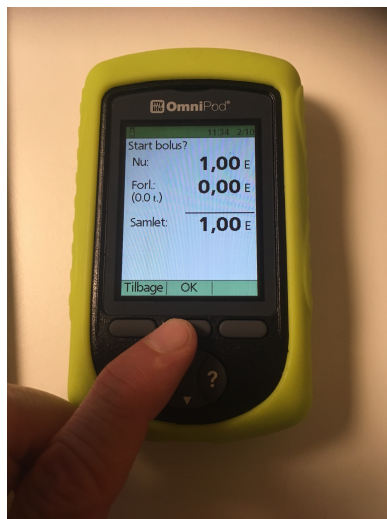

10. Vælg OK



11. Insulin indgift er i gang. Der kommer ikke en bekræftelsesbesked.